


担ぎ手人数 **1～3人**


160cmタイプは緊急時・災害発生時に交通弱者〔寝たきり、立ち居振る舞いの動作がスムーズに行かない）方の移動の手助けに最適です。



左右からベルトを肩に掛けて、
両手で頭と足のベルトを握り
ゆっくりと持ち上げて下さい。
移動は矢印方向へ、担ぎ手が
上体を向けて歩いて下さい。

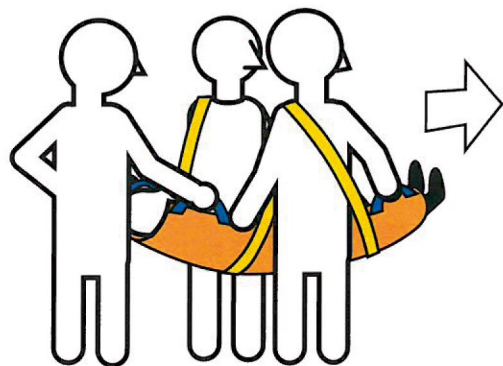


2人担ぎの持ち方で頭部を、
もう1人でベルトを握り、
ゆっくりと持ち上げて下さい。

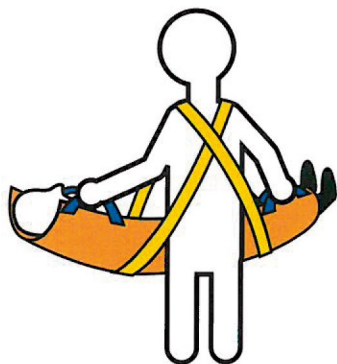

2本のベルトを背中で交差させ、頭と足の左右のベルト2本を握りゆっくりと持ち上げて下さい。

担架に人を乗せる位置

頭側ストッパー

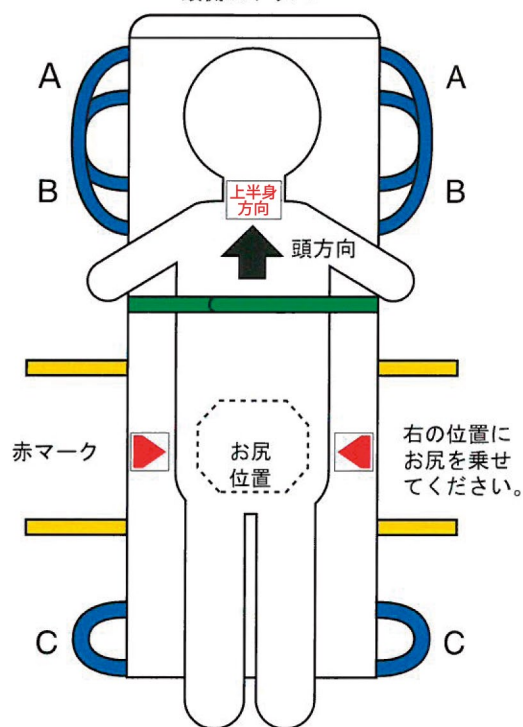

使用手順

1. 梱包してあるチャックを開きシートを広げると担架になります。搬送者のお尻を担架の赤マークの位置に寝かせ、胸部と腹部の間1カ所に緑色ベルトで固定します。
2. 肩ベルトの長さは、担ぐ人の中で身長の高い人に合わせて調整してください。
3. 2人又は1人で担ぐ時は、A、Bの取手を一緒に握ります。3人で担ぐ時は頭側の人が左右のA取手を持ち、他の2人がそれぞれB、Cを持ちます。

使用手順

1. 外装は本体一体型でなので使用時タンカ裏にテープで固定出来ます。
2. 防水、防災布を使用しているため、汚れは中性洗剤で拭き取ってください。
3. 本体タンカは安全重視で4層構造の縫製をしてありますが、身体移動以外には使用を避けてください。

仕様

サイズ	長さ175cm(補助部材含む)	横幅50cm
重量	1.9Kg	耐荷重 100Kg
材質	ポリエステル	ナイロン
構造	表地	ナイロン(撥水布)
	裏地	ポリエステル(防炎、防水布)
フレームベルト	ポリプロピレン	