



救護担架の畳み方


1. 担ぎ終えた状態で黄色ベルトの肩クッションを2の図の様に移動させます。

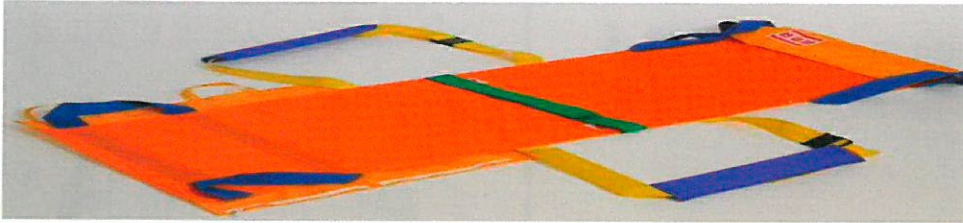


2. 頭側から折りたたみます。(ウレタンマットも一緒に)

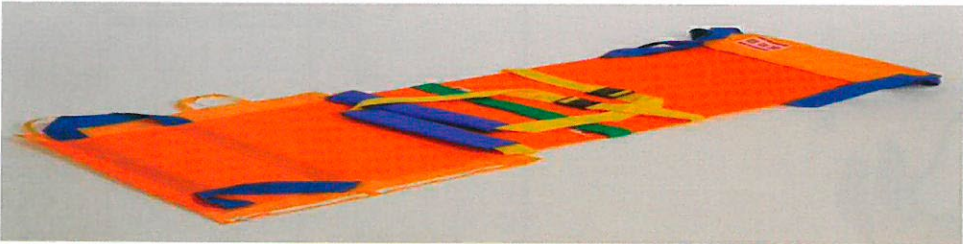

3. 順次足元側に折りたたみます。

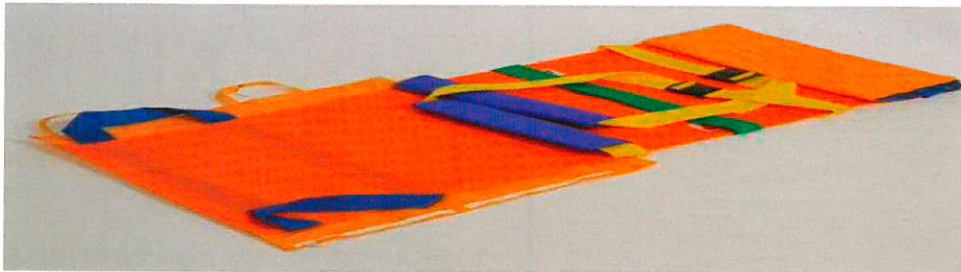

4. 畳み終わると外袋で覆います。

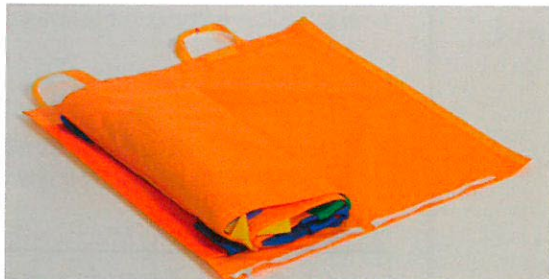

5. 元の状態で保管できます。



担架保管時のお願い

担架生地は防炎機能を持たせるために特殊接着材を使用しています
稀に保管場所の塗装剤から塗料が担架生地に移行することが御座います
(身体への影響は御座いません)

保管時次の点にご注意ください。

長期間同じ場所や直射日光、高温場所は避けて、保管ください。

付属のウレタンマットは頭、足、腰部位にご利用ください。

頭部にお使いの時は折りたたんで枕状に出来ます。