

❖ 使用手順 ❖

救護、介護、入浴用担架、「担架サイズ 140 cm～180 cm」

ワンタッチ式ベルトタンカ 在位保持が難しい人対応

- 1 2人担ぎで身長差が有る場合は、身長の低い人のウエスト位置に担架が水平になるよう、肩ベルト「黄色」を調整します。「1人で担ぐ場合も同様です」
- 2 運ばれる人の身体下に担架を差込み、身長差に関係なく、▲印にお尻位置がくるように寝かせます。
- 3 運ばれる人の身長が 170 cm以上か、体重の重い人を搬送する場合は、頭側や足側に担ぐ人を増やしてください。「救急隊員の方も3人で対応されています」狭小箇所や階段移動は添付図のように、担ぐ人の位置を変えて、安全に搬送してください。
- 4 肩ベルトはカバン掛けのように、身体に斜めに掛けて接続具(バックル)にカチットと音がするよう、しっかりと接続してください。(1人担ぎは肩ベルトを[X]に)
- 5 静かに立ち上がり、足方向から移動します。「担ぐ人は出来るだけ進行方向に身体を向けて歩きますと、楽に歩けます。」
- 6 仕様ベルト「厚さ 1.6mm*幅 50mm」1本の引っ張り強度は 588kg です。担架は 8 本仕様ですが、身体以外の搬送には使用しないでください。